




Test antigénique rapide Panbio COVID-19 Ag pour le dépistage asymptomatique – Guide de référence rapide

- Conservez tous les réactifs et les tests de détection antigéniques rapides Abbott Panbio COVID-19 Ag à une température de 2 à 30 °C. Placez-les à température ambiante (15 à 30 °C) pendant 30 minutes avant d'effectuer le test. N'ouvrez pas la pochette de test avant que les composants ne soient à température ambiante.
- Portez toujours l'EPI approprié avant d'effectuer un test.
 - o Masque médical à trois couches
 - o Gants médicaux
 - o Protection oculaire
 - o Blouse

La trousse de test antigénique rapide Panbio COVID-19 Ag contient les éléments suivants :

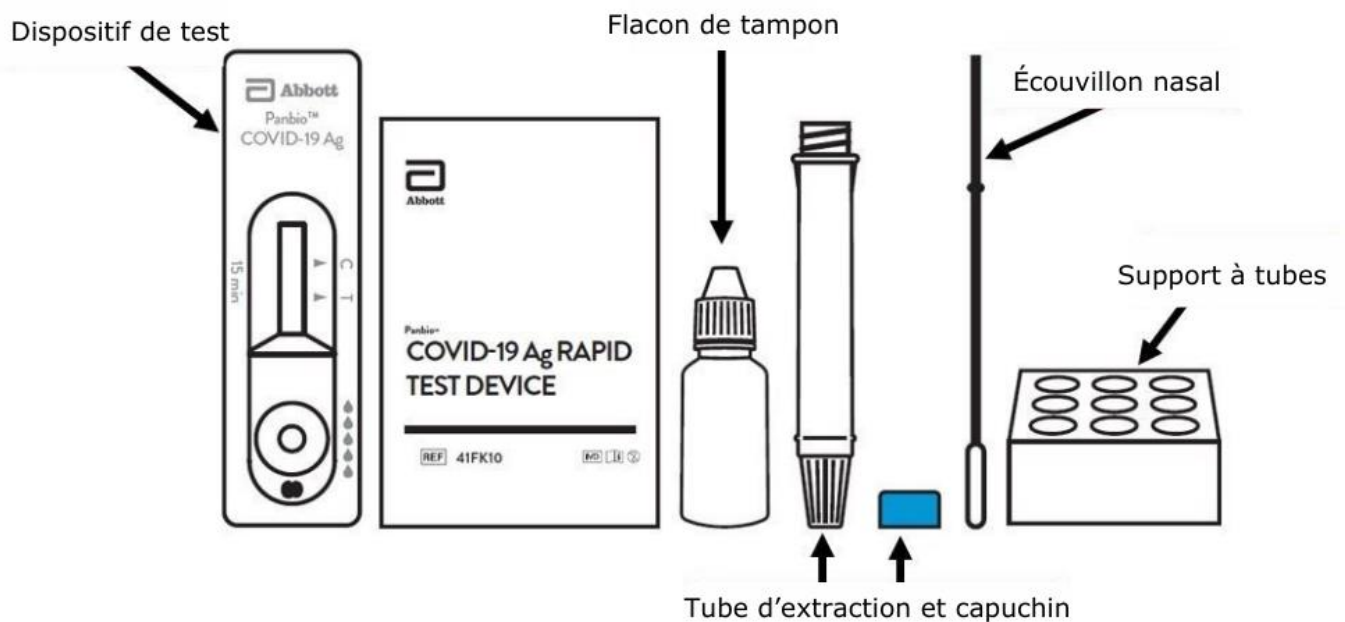


Lien de la vidéo (en anglais) sur la PROCÉDURE DU TEST Abbott Panbio : [Procédure de test d'échantillon sur écouvillon nasal Panbio^{MC} COVID-19 Ag](#)



Étapes	Diagrammes
<ul style="list-style-type: none"> • Lavez-vous les mains et enfiler l’EPI approprié. • Notez le numéro d’identification du client dans le registre de tests antigéniques. • Étiquetez le tube d’extraction et le dispositif de test en indiquant le nom et le numéro d’identification du client. • Tenez le flacon de tampon à la verticale et remplissez le tube d’extraction jusqu’à la ligne de remplissage. • Placez le tube d’extraction dans le porte-tubes. • Récoltez un échantillon à l’aide de l’écouvillon nasal. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Insérez immédiatement l’écouvillon (écouvillon Panbio) dans le tube d’extraction en vous assurant de plonger la pointe de l’écouvillon dans la solution tampon. • Pour retirer l’échantillon, faites tourbillonner délicatement la pointe de l’écouvillon dans la solution tampon à l’intérieur du tube d’extraction en poussant sur la paroi au moins cinq fois. • Faites sortir l’écouvillon en pressant le tube d’extraction avec vos doigts. • Cassez l’écouvillon au point de rupture et jetez la pointe brisée de l’écouvillon dans un contenant pour objets contaminés. • Retirez le capuchon de la buse à goutte (en bas du tube). 	



- Laissez tomber **5 gouttes** d'échantillons extraits dans le puits d'échantillon (S) du dispositif en pressant délicatement le tube d'extraction.
- Démarrez la minuterie et lisez les résultats après 15 minutes. Ne lisez **pas** les résultats après 20 minutes.
- Consignez les résultats (voir la section « Interprétation des résultats » ci-après).
- Jetez le dispositif de test et le tube d'extraction.
- Retirez l'EPI et lavez-vous les mains.

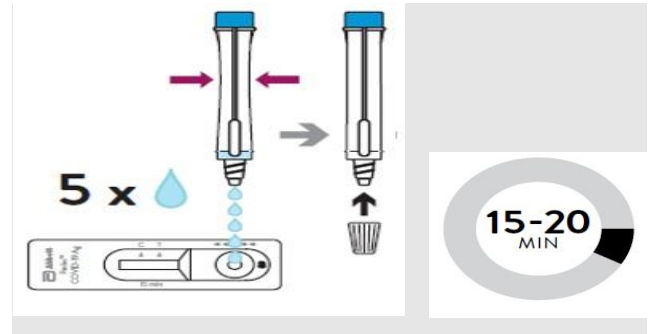

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

Résultat	Description et rapport	Rapport/Suivi	Image
Positif	La présence de la ligne de test (T) et de la ligne de contrôle (C) dans la fenêtre de résultat, quelle que soit la ligne qui apparaît en premier, indique un résultat positif.	<p>Consignez le résultat positif dans le registre des tests antigéniques rapides Panbio COVID-19 Ag.</p> <p>Assurez-vous que le client ne retourne pas au travail et expliquez-lui les consignes d'isolement à suivre. Informez-le qu'il s'agit d'un test de DÉPISTAGE. Dites-lui de prendre rendez-vous pour un test de confirmation.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voir le scénario d'appel en cas de résultat positif; passez-le en revue avec le client. - Donnez au client le document d'information qu'on remet aux patients testés 	



		<p>positifs et lisez-lui les consignes.</p> <p>Consignez le résultat positif dans le registre de suivi des résultats positifs et faux positifs.</p>	
<p>Négatif</p>	<p>Si seule la ligne de contrôle (C) est visible dans la fenêtre de résultat et que la ligne de test (T) n'apparaît pas, le résultat est négatif.</p>	<p>Consignez le résultat négatif dans le registre des tests antigéniques rapides Panbio COVID-19 Ag.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voir le scénario d'appel en cas de résultat négatif; passez-le en revue avec le client. 	
<p>Non valide</p>	<p>Si la ligne de contrôle (C) n'est pas visible dans la fenêtre de résultat après l'exécution du test, le résultat est considéré comme non valide.</p>	<p>Consignez le résultat non valide dans le registre des tests antigéniques rapides Panbio COVID-19 Ag.</p> <p>Refaites le test. Si le second résultat est lui aussi non valide, il faut alors suivre la même procédure qu'en cas de résultat positif (dire au client de cesser le travail, de s'isoler et de prendre rendez-vous pour un test de confirmation).</p>	



Administration des services de
santé et des services sociaux
DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST



DétectTNO
PROGRAMME DE DÉPISTAGE
ANTIGÉNIQUE RAPIDE

