



Dépistage de la COVID-19 par le test Abbott Panbio^{MC} : Clé de réponse du questionnaire d'évaluation

	Affirmations	Vrai/Faux
1	Le test de détection antigénique rapide Panbio COVID-19 Ag peut geler à une reprise.	F
2	Les échantillons prélevés doivent être analysés immédiatement.	V
3	Le prélèvement consiste à faire tourbillonner la pointe de l'écouvillon dans le tampon à l'intérieur du tube d'extraction en poussant dans la paroi du tube d'extraction au moins 3 fois.	F
4	Deux gouttes d'échantillon doivent être déposées dans le puits d'échantillon de la cartouche du test.	F
5	Tous les types d'écouvillons (salivaire, nasal, nasopharyngé) sont compatibles avec le test de détection antigénique rapide Panbio COVID-19 Ag.	F
6	La lecture d'un résultat avant un délai de 15 minutes ou après 20 minutes est susceptible de générer un résultat erroné.	V
7	L'image ci-dessous indique un résultat <u>négatif</u> .	V
8	L'image ci-dessous indique un résultat <u>positif</u> .	F
9	Lorsqu'il y a résultat positif, la personne responsable du dépistage doit mentionner à la personne testée d'autodéclarer son résultat positif en appelant Protégeons les TNO et de s'isoler immédiatement.	V
10	Un résultat négatif sera simplement consigné comme tel, sans qu'aucun suivi ne soit nécessaire.	V