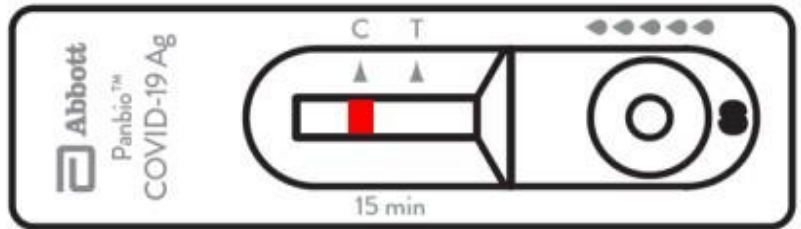



Dépistage de la COVID-19 par le test Abbott Panbio^{MC} : Questionnaire d'évaluation

Instructions : La note de passage pour cette évaluation est de 80 %. Il revient à l'organisation participante et à la personne formée de conserver une attestation de réussite. Il faut réussir la présente évaluation chaque année pour avoir l'autorisation de réaliser le test Abbott Panbio dans le cadre du Programme de dépistage antigénique rapide DétectTNO pour personnes asymptomatiques.

Numéro d'employé (n° d'identification) :	Nom et prénom :
Entreprise/Organisme : Courriel : Téléphone : Date d'évaluation :	Poste/Titre :

Répondez aux affirmations en choisissant VRAI ou FAUX. La note de passage est de 80 %.

	Affirmations	Vrai/Faux
1	Le test de détection antigénique rapide Panbio COVID-19 Ag peut geler à une reprise.	
2	Les échantillons prélevés doivent être analysés immédiatement.	
3	Le prélèvement consiste à faire tourbillonner la pointe de l'écouvillon dans le tampon à l'intérieur du tube d'extraction en poussant dans la paroi du tube d'extraction au moins 3 fois.	
4	Deux gouttes d'échantillon doivent être déposées dans le puits d'échantillon de la cartouche du test.	
5	Tous les types d'écouvillons (salivaire, nasal, nasopharyngé) sont compatibles avec le test de détection antigénique rapide Panbio COVID-19 Ag.	
6	La lecture d'un résultat avant un délai de 15 minutes ou après 20 minutes est susceptible de générer un résultat erroné.	
7	L'image ci-dessous indique un résultat <u>négatif</u> . 	

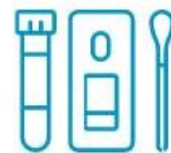

8	<p>L'image ci-dessous indique un résultat <u>positif</u>.</p> 	
9	<p>Lorsqu'il y a résultat positif, la personne responsable du dépistage doit mentionner à la personne testée d'autodéclarer son résultat positif en appelant Protégeons les TNO et de s'isoler immédiatement.</p>	
10	<p>Un résultat négatif sera simplement consigné comme tel, sans qu'aucun suivi ne soit nécessaire.</p>	